

Fleurocup é um coletor menstrual de uso interno de fácil colocação, reutilizável, feito de material hipoalergênico (silicone medicinal ou TPE). Substitui completamente os absorventes convencionais. Os absorventes internos absorvem o fluxo, podendo secar e irritar as paredes vaginais, enquanto o Fleurocup simplesmente recolhe o fluxo menstrual. Não tem contra indicação, pois não interfere com a flora vaginal e não provoca o odor característico do período menstrual ao deixar o fluxo protegido do ar. Fleurocup proporciona ainda praticidade e muita economia, podendo ser utilizado por vários anos.

É encontrado em 2 tamanhos:

- Pequeno, para mulheres com menos de 30 anos e que não tenham tido parto natural.
- Grande, para mulheres com mais de 30 anos ou que já tenham tido parto natural.

Fleurocup é fácil de inserir e remover. Sua forma e elasticidade adaptam-se perfeitamente às paredes vaginais, proporcionando conforto e liberdade absoluta para todos os tipos de atividades durante a menstruação.

Para retirar o Fleurocup, puxe-o pela haste ou comprima sua base até que perca sua aderência às paredes vaginais. Para higienizar o seu Fleurocup durante o ciclo menstrual, retire-o 2 a 4 vezes ao dia, de acordo com a intensidade do fluxo, lave-o em água corrente, e volte a inseri-lo. O Fleurocup pode ser virado do lado do avesso para sua melhor higienização. Após cada ciclo, esterelizá-lo em água fervente por 5 minutos e secar bem. Guardá-lo em local limpo.

O coletor menstrual Fleurocup é mais seguro, mais prático, mais barato e muito menos poluente do que os absorventes comuns, já que ao longo da vida fértil de uma mulher, ela utiliza cerca de 12 mil absorventes.

Ele pode ser usado mesmo se você tiver um DIU ou anel contraceptivo.

O COLETOR MENSTRUAL FLEURCUP NÃO É UM CONTRACEPTIVO E NÃO PROTEGE CONTRA DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) E DEVE SER RETIRADO DURANTE A RELAÇÃO SEXUAL.

Durabilidade:

Ecologicamente correto, dura de 5 a 10 anos quando bem cuidado, sendo reutilizável, bastando lavá-lo bem após o uso.

Uso:

Fleurocup pode ser usado durante todo o período menstrual, inclusive à noite e durante a prática de atividades físicas, mesmo as mais intensas. Pode ser utilizado por 12 horas consecutivas; a maior parte das mulheres só precisa esvaziá-lo duas vezes por dia. A textura do produto garante inserção e retirada suaves, facilitadas também pelos 4 orifícios na borda, e uma limpeza eficiente. A haste flexível se adapta para o seu maior conforto.

As três primeiras figuras mostram maneiras diferentes de dobrar o Fleurocup:




PERLAS PRILL
Saúde Integral

FLEURCUP

COLETOR MENSTRUAL REUTILIZÁVEL

Silicone Medicinal Hipoalergênico

Durabilidade Média: 5 a 10 anos